

Gebrauchsanweisung für Messlöffel (Art. Nr. 1009xx)



Hersteller des Messlöffels:

Manfred Schägner GmbH
Industriestr. 3
76479 Steinmauern
Deutschland
Tel. : +49 7222 9274 0
FAX: + 49 72 22 690 36
e-mail: info@schaegner.de
www.schaegner.de

Bitte beachten Sie, dass der folgende Wortlaut der Gebrauchsanweisung ein Vorschlag ist. Da Schägner als rechtlicher Hersteller des Messlöffels keine detaillierten Informationen über das Arzneimittel, mit welchem der Messlöffel zusammen verpackt wird, hat, liegt es in der Verantwortung des pharmazeutischen Unternehmens, welches den Messlöffel der Arzneimittelpackung beipackt, diese Gebrauchsanweisung an die speziellen Anforderungen des pharmazeutischen Unternehmens anzupassen (s. auch „Demarcation of responsibilities“ wie zwischen Schägner und pharmazeutischem Unternehmen vereinbart).

Vorschlag für die Gebrauchsanweisung des Messlöffels:

“Der Messlöffel ist für die Dosierung und orale Verabreichung eines flüssigen Arzneimittels bestimmt.

Zu diesem Zweck wird der Messlöffel auf eine ebene Fläche gelegt. Die zu dosierende Flüssigkeit wird bis zur Graduierungslinie $\frac{1}{2}$ (=2,6 ml) beziehungsweise 1/1 (=5,2 ml) in den Löffel gefüllt, entsprechend der beschriebenen Dosis im Beipackzettel des Arzneimittels.

Anschließend wird der befüllte Löffel sorgfältig in den Mund genommen. Dafür wird Messlöffel am Griff gehalten und die Flüssigkeit kann geschluckt werden.

Der Messlöffel ist vom Hersteller für die Mehrfachanwendung bis zum Aufbrauchen des Arzneimittels, mit welchem der Messlöffel vermarktet wird, vorgesehen und soll danach über den Hausmüll entsorgt werden. Nach jeder Anwendung muss der Messlöffel mit Spülmittel-haltigem Wasser gespült und danach mit einem Papiertuch abgetrocknet werden.

Sicherheitshinweis:

- **Messlöffel mit offensichtlichen Beschädigungen oder unleserlicher Graduierung dürfen nicht angewendet werden sondern sollen an die Apotheke, das pharmazeutische Unternehmen oder den Hersteller zurückgegeben werden.“**

Dr. Ute Linder
Manfred Schägner GmbH
Sicherheitsbeauftragte Medizinprodukte

