


Gebrauchsanweisung für Nagelraspel (Art. Nr. 1028xx)

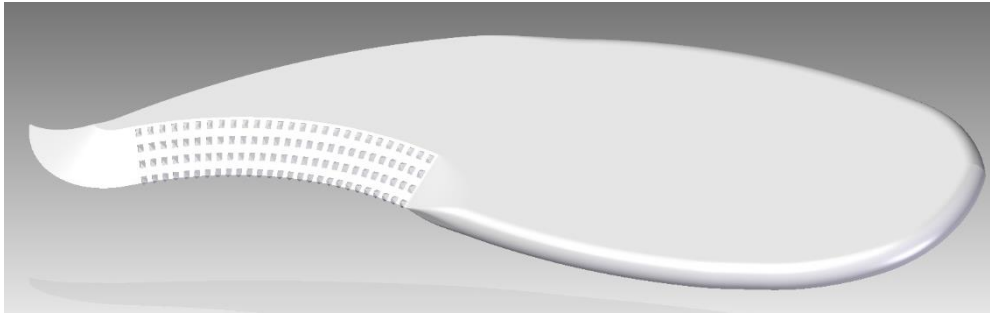

Hersteller der Nagelraspel:

Manfred Schägner GmbH
Industriestr. 3
76479 Steinmauern
Deutschland
Tel. : +49 7222 9274 0
FAX: + 49 72 22 690 36
e-mail: info@schaegner.de
www.schaegner.de

Bitte beachten Sie, dass der folgende Wortlaut der Gebrauchsanweisung ein Vorschlag ist. Da Schägner als rechtlicher Hersteller der Nagelraspel keine detaillierten Informationen über das Arzneimittel, mit welchem die Nagelraspel zusammen verpackt wird, hat, liegt es in der Verantwortung des pharmazeutischen Unternehmens, welches die Nagelraspel der Arzneimittelpackung beipackt, diese Gebrauchsanweisung an die speziellen Anforderungen des pharmazeutischen Unternehmens anzupassen (s. auch „Demarcation of responsibilities“ wie zwischen Schägner und pharmazeutischem Unternehmen vereinbart).

Vorschlag für die Gebrauchsanweisung der Nagelraspel:

“Die Nagelraspel ist für die Entfernung aufgeweichter Nagelsubstanz und Haut bestimmt, die durch das Arzneimittel, welchem die Nagelraspel beigelegt ist, aufgeweicht wurde.

Für die Anwendung wird die Nagelraspel fest am breiten Griff gehalten (glattes, abgerundetes Ende). Das Abschaben der aufgeweichten Haut/Nagelsubstanz erfolgt mit dem gezahnten, angeschliffenen Ende.

Die Nagelraspel ist vom Hersteller für die Mehrfachanwendung bis zum Aufbrauchen des Arzneimittels, mit welchem die Nagelraspel vermarktet wird, vorgesehen und soll danach über den Hausmüll entsorgt werden. Nach jeder Anwendung muss die Nagelraspel mit einer milden Seife und lauwarmem Wasser gereinigt werden.

Sicherheitshinweis:

Vermeidung von Verletzungen:

- **für eine optimale Leistung ist die Nagelraspel mit einem scharfen und spitzen Ende ausgestattet. Die Handhabung der Nagelraspel sollte dementsprechend wie oben beschrieben erfolgen, um Verletzungen zu vermeiden.**
- **Nagelraspeln mit offensichtlichen Beschädigungen dürfen nicht angewendet werden sondern sollen an die Apotheke, das pharmazeutische Unternehmen oder den Hersteller zurückgegeben werden.“**

Dr. Ute Linder
Manfred Schägner GmbH
Sicherheitsbeauftragte Medizinprodukte

